



Очистка, дезинфекция, хранение небулайзера  
при использовании одним пациентом

# Гигиена

Вопросы гигиены очень важны при использовании небулайзеров для предупреждения контаминации и перекрёстной инфекции

Все части небулайзеров **ПАРИ** рекомендуется:

- термически дезинфицировать (кипячением или в ПАРИзаторе)
- химически дезинфицировать
- рекомендуется обработка после каждой ингаляции
- перед сборкой все части небулайзера должны быть высушены!

**Окончание ингаляции – это уже начало следующей ингаляции !**

## Очистка небулайзера

- Разберите небулайзер на составные части
- Промойте в теплой воде с добавлением моющего средства, например для мытья посуды
- Тщательно прополощите небулайзер под струей проточной воды

## **Дезинфекция небулайзера при индивидуальном использовании**

- Прокипятите части небулайзера в течение 15 минут, проследив, чтобы в емкости было достаточное количество воды (все части должны быть погружены в воду)

**или**

- Поместите части небулайзера в раствор дезинфекционного средства на время, указанное в инструкции к дезинфекционному средству
- Тщательно прополощите части небулайзера под струей проточной воды и прокипятите небулайзер как указано выше

## Рекомендации по дезинфекции и стерилизации небулайзеров

Наименование	ВИД ОБРАБОТКИ			Концентрация %	t° Рабочего раствора	Экспозиция
	Дезинфекция высокого уровня ИМН	ПСО ИМН + дезинфекция	Стерилизация ИМН			
Бианол	✓	-	✓	0,2 – 2 20	20°C	15-30 мин 600 мин
Бриллиант	✓	✓	✓	0,5 – 10	18°C	15-60 мин
Виркон	✓	✓	-	1 – 2	18°C	10-5 мин
Деконекс 50 плюс	✓	-	✓	1 - 8	35°C	60 мин
Гранокс+	✓	✓	✓	2 - 5	20°C	15-45 мин
Лизафин	-	✓	-	1 – 2	18°C	15-60 мин
Лизоформин 3000	✓	✓	✓	1.5	18°C	30 мин
Сабисепт М	✓	✓	✓	1 - 2	20°C	30 мин
Секусепт актив	✓	✓	✓	1 - 2	18°C	15-60 мин 90-120мин

## Высушивание небулайзера

- Извлеките части небулайзера после кипячения
- Высушите небулайзер при комнатной температуре поместив части небулайзера на сухое, чистое, неволокнистое полотенце
- Можно использовать для высушивания бытовой фен

# Хранение небулайзера

- Соберите небулайзер
- Храните небулайзер завернутым в чистую проглаженную салфетку или полотенце

Уважаемые пациенты!  
День рождения вашего небулайзера

1-2 раза в год,  
по возможности - 1 раз в 3 месяца

Не забывайте об этом!





# Годовые комплекты ПАРИ

- небулайзер
- трубка-воздуховод
- фильтр к компрессору

*Рекомендуется заменять не реже  
1 раза в год*



Небулайзер  
**ПАРИ ЛЦ СПРИНТ**  
(годовой комплект 5X)  
номер заказа 023G8514



Небулайзер  
**ПАРИ ЛЦ СПРИНТ**  
(годовой комплект 5)  
номер заказа 023G1014



Небулайзер  
**ПАРИ ЛЦ СПРИНТ Юниор**  
(годовой комплект)  
номер заказа 023G1114



**Специалисты в эффективной ингаляции**